


Olu dokuyu uzaklastirin
CANSIZ Doku ≠ **CANLI** Doku!

T



Otolitik Debridman

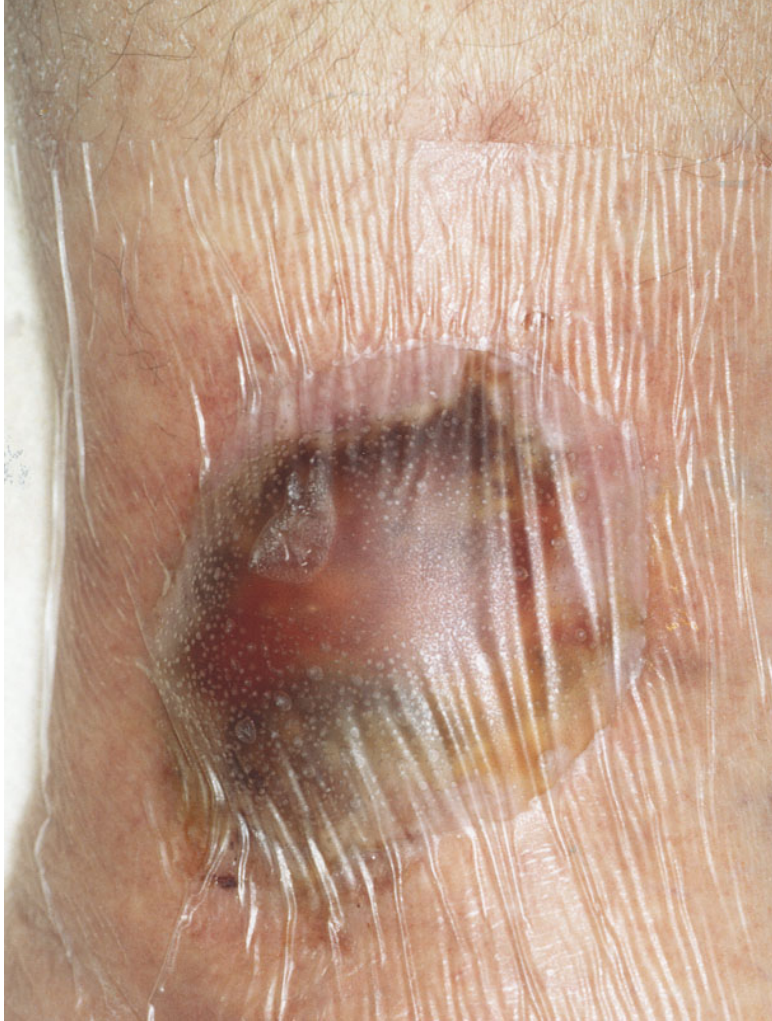

Yaradaki nekrotik ve canlı olmayan doku iyileşmenin önünde önemli bir engel teşkil eder. Enfeksiyon riskini artırır ve epitel hücrelerinin migrasyonunu engeller. Nekrozlu ve balçığımsı dokunun uzaklaştırılması optimal yara iyileşmesinde hayatidir.

Nekrotik dokunun debridmanı yara kokusunu azaltır ve enfeksiyon riskini azaltarak yeni doku büyümesini hızlandırır. Debridman tekniklerine aşağıdakiler dahildir:

- Otolitik debridman
- Keskin ve cerrahi debridman
- Mekanik debridman
- Hidrocerrahi debridman.

Otolitik debridman en hafif yöntem olup birçok nekrotik ve balçığımsı dokuların olduğu yaralar için uygundur. Aşağıdaki ürünleri otolitik debridmanı teşvik ederek yara içindeki ve çevresindeki dokunun iyileşme sürecinde yaşayabilir kalmasını sağlar.

INTRASITE™ Gel



INTRASITE Gel, nekrozlu ve deri döküntülü yaraları hafif ve etkili bir şekilde debride eden ve balçığımsı dokulardan arındıran amorf bir hidrojeldir.

INTRASITE Gel, ürünün yara içindeki nem seviyesine yanıt vermesine izin veren ve emilim ve rehidrasyonu uygun şekilde dengeleyen patentli çapraz bağlı bir polimerden meydana gelmektedir.

INTRASITE Gel steril, şeffaf, serbest akışlı bir jel olup jelin kontrollü bir şekilde uygulanabilmesini sağlayan kolay kullanımlı bir aplikatör ambalaj içinde sunulmaktadır. Hızlı ve rahat bir iyileşmeyi teşvik etmek için iki şekilde işlev göstermektedir:

- Balçığımsı dokuyu ve eksüdayı gevşetip, hassas granülasyon dokusuna hasar vermeden jelin içine emerek
- Jelden su alınmasıyla yara arayüzünde nemli bir iyileşme ortamı oluşturarak yaranın rehidrasyonu yoluyla.

• İçerik:

Carboxymethylcellulose	%2.3
Propylene Glycol USP	%20.0
Saf su	% 77.7

